



NOTICE D'UTILISATION :

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

MASQUE à Usage Non Sanitaire UNS 1

Le masque UNS à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie.

Performances : Masque réservé à des usages non sanitaires suivant l'avis de l'ANSM du 24 mars 2020 et la note d'information du 29 mars 2020. Matériau dont les performances ont été mesurées par le laboratoire AITEX Pol Ind Can Volart 08150 Parets del Vallès Espagne selon les normes ISO6330:2012 (rapport 2020TM0482) qui supporte 5 lavages. Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins (RT-C-PF-20204-2).

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Recommandations de manipulation des masques :

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
- lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ;
- pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; isoler immédiatement le masque dans un sac plastique (à jeter après usage) ou dans un sac prévu à cet usage (réutilisable à laver) ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique

Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Ce masque a été conçu pour être lavé 5 fois et réutilisé 6 fois.

Composition de la matière principale : 100% polyester

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière

Les masques ne doivent pas être portés par les enfants de moins de 4 ans. Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. Le lot de 10 pièces est indivisible pour de la vente au détail.